

### ALLGEMEINE HINWEISE


- Die Verwendung des **Pronox** Schnarchpflasters bei Apnoikern ist bisher nicht ausreichend untersucht und insofern erfolgt die Anwendung unter eigener Verantwortung.
- Stellen Sie vor der Anwendung des **Pronox** Schnarchpflasters sicher, dass Sie gut durch die Nase atmen können.
- Sollte es bei Anwendung des Pflasters zu Hautirritation und/oder Rötung der Haut kommen, sind Sie ggf. empfindlich gegen einen oder mehrere Bestandteile des Pflasters. Brechen Sie die Verwendung ab und konsultieren Sie einen Arzt.
- Das Schnarchpflaster darf nicht unter Einfluss von Drogen angewendet werden.
- Nicht verschlucken!
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

### ART UND DAUER DER ANWENDUNG

- Wir empfehlen die Nutzung während des gesamten Schlafes.
- Das **Pronox** Schnarchpflaster ist für den Einmalgebrauch vorgesehen.
- Das **Pronox** Schnarchpflaster ist vor dem Schlafen anzulegen.


### LAGERUNG UND HALTBARKEIT

- Das Mundpflaster soll kühl, dunkel und trocken aufbewahrt werden und behält seine wesentlichen Eigenschaften für drei (3) Jahre bei einer Lagerung zwischen +5°C bis max. +35°C. Eine Lagerung im Kühlschrank ist nicht erforderlich.
- Das Herstellungs- und Verfallsdatum entnehmen Sie bitte dem Packungsbogen. Bitte verwenden Sie das Mundpflaster nicht nach Ablauf der Haltbarkeit.

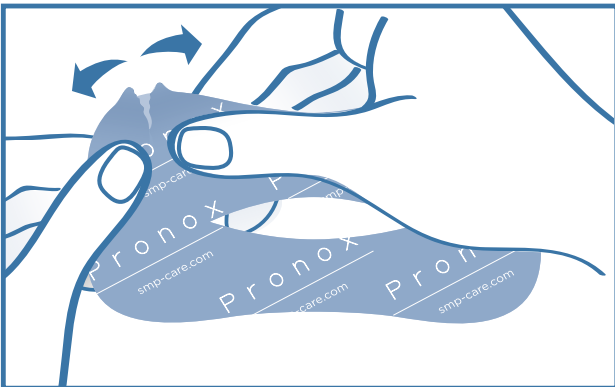


#### Schritt 1: Trägerpapier entfernen

Das Pflaster, mit Blick auf die Rückseite, mit beiden Daumen und Zeigefingern festhalten und von oben nach unten etwas einreißen. Danach das Trägerpapier entfernen.

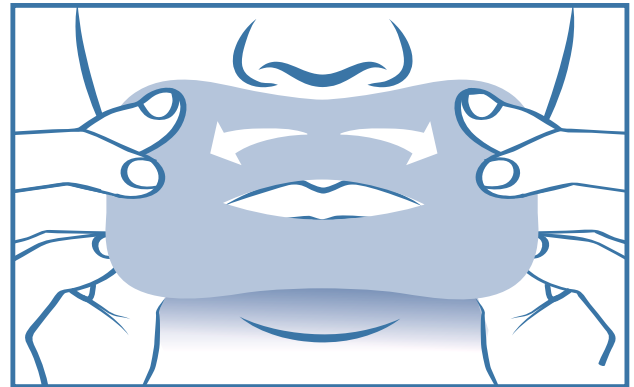


#### Schritt 2: PRONOX oben anlegen

Das Pflaster mittig zwischen Nase und Oberlippe anlegen und gleichzeitig leicht nach außen ziehen.

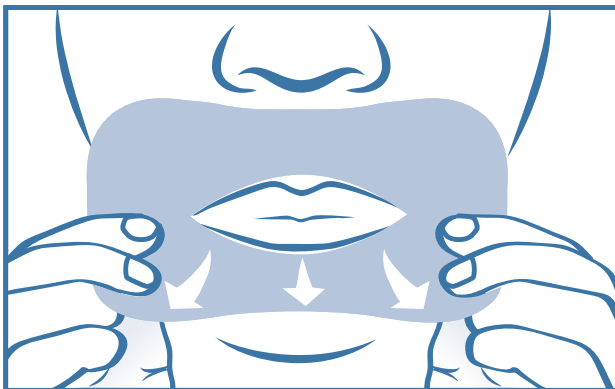

#### Schritt 3: nach unten ziehen

Die untere Hälfte unter die Unterlippe ziehen und gleichzeitig mit leichtem Zug soweit nach außen ziehen, dass die Mundwinkel noch überklebt bleiben. Jetzt können Sie das Pflaster flächig feststreichen.

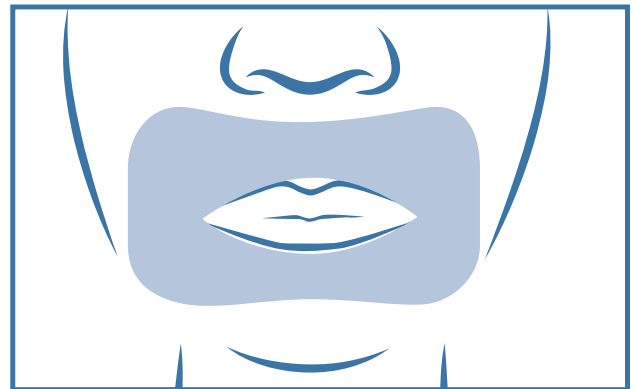

#### So sitzt PRONOX richtig!

Die Lippen bleiben frei und die Mundwinkel sind leicht überklebt. Man soll beim Öffnen des Mundes einen leichten Widerstand spüren. Der Widerstand muss so groß sein, dass sich der Mund über Nacht nicht selbständig öffnet.